


(1)

Staccare il braccialetto dal suo supporto

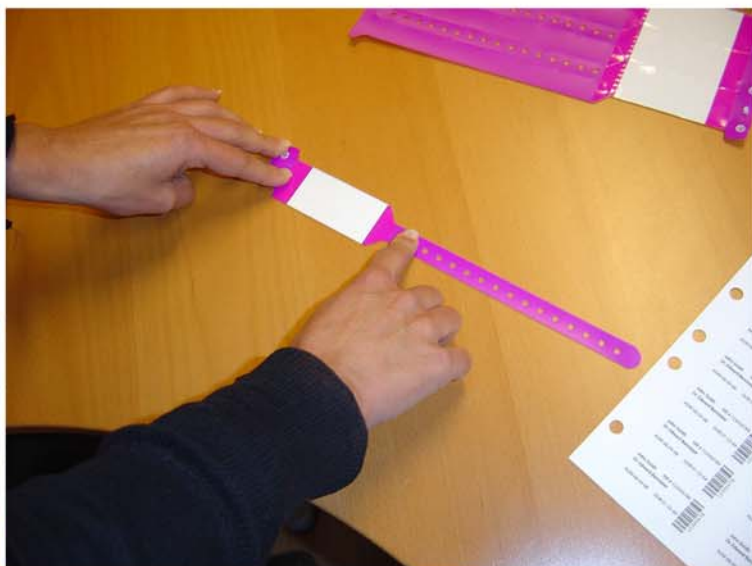


(2)

Depositare il braccialetto su una superficie piatta




(3)

Sollevare lo schermo trasparente e la pellicola bianca dalla parte del cinturino, tenendolo fermo con un dito

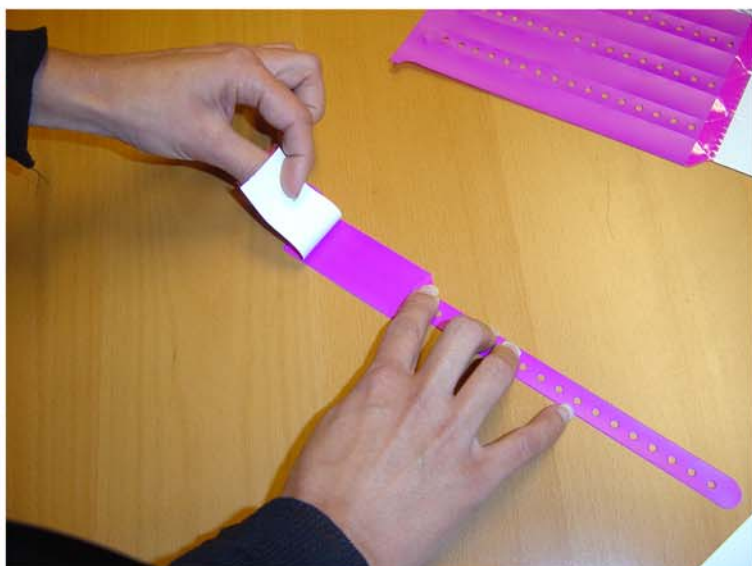

(4)

Sollevare lo schermo e la pellicola bianca dalla destra verso la sinistra

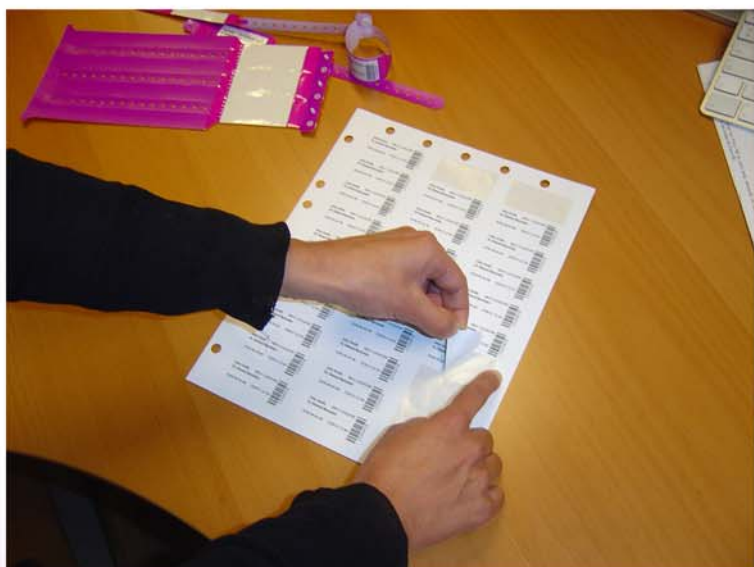


(5)

Staccate l'etichetta dal vostro attuale sistema di etichettatura




(6)

Incollare l'etichetta nell'apposito spazio
Premere con forza per far aderire l'etichetta

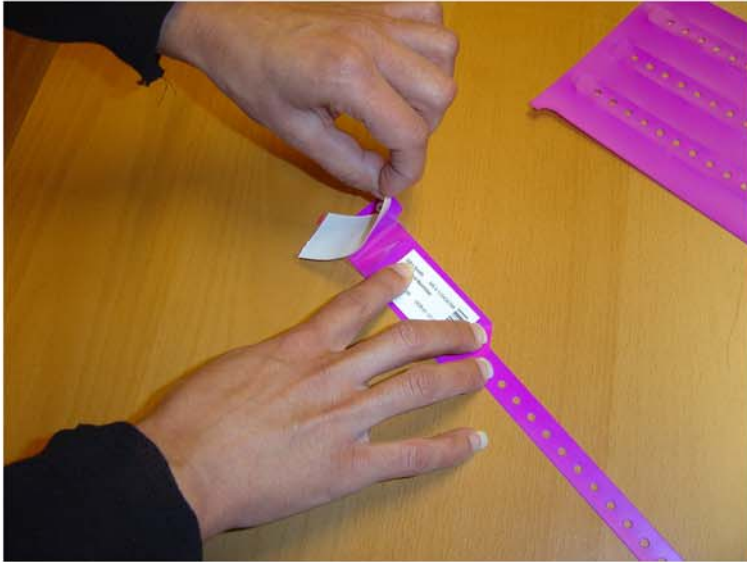

(7)

Togliere la pellicola bianca dallo schermo trasparente

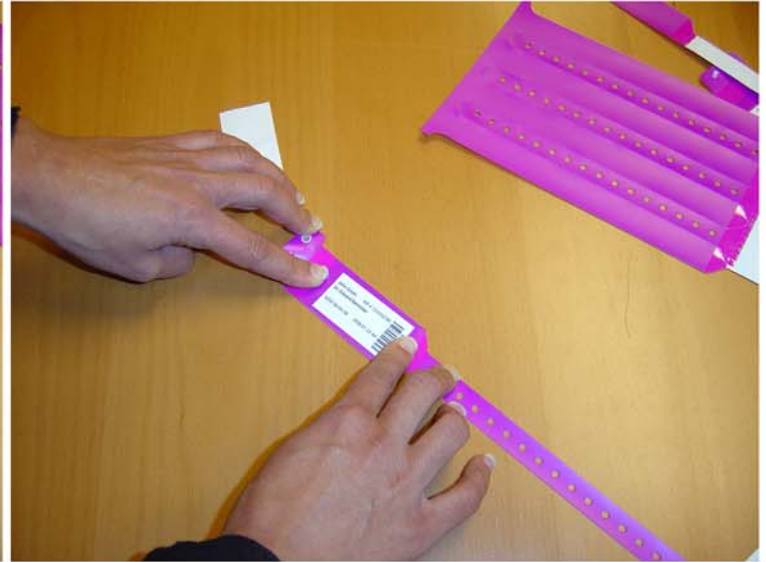

(8)

Premere più volte lo schermo trasparente da sinistra verso destra, appoggiandosi su una superficie piatta per facilitare l'adesione



(9)

Applicare il braccialetto al paziente lasciando lo spazio di un dito tra la chiusura del braccialetto ed il polso



(10)

Chiudere l'apposito clip



(11)

Una chiusura ed un'applicazione corretta rendono il bracciale assolutamente ermetico e confortabile